



JusChek CRP – kasetowy test CRP

JusChek CRP półilościowy szybki test kasetowy (krew pełna/osocze/surowica) jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do półilościowego oznaczania poziomu białka CRP w krwi pełnej, surowicy lub osoczu jako pomoc w diagnostyce stanu zapalnego.

CRP

CRP czyli białko C-reaktywne z ang. C-reactive protein to jeden z głównych wskaźników stanów zapalnych w organizmie. Poziom CRP w osoczu wzrasta w ciągu 6 do 8 godzin po wystąpieniu ostrego zdarzenia, takiego jak na przykład infekcja bakteryjna lub uraz i osiąga swój szczyt w ciągu około 48 godzin po wystąpieniu zdarzenia. Poziomy te szybko spadają po ustaniu zdarzenia wywołującego, a okres półtrwania CRP wynosi 48 godzin.

Zazwyczaj nasilenie stanu zapalnego i aktywność zapalenia wpływają na wielkość wzrostu CRP.

CRP szybki test kasetkowy

JusChek CRP to kasetowy test diagnostyczny przeznaczony do szybkiej, półilościowej oceny poziomu CRP we krwi, osoczu lub surowicy.

- odczyt wyniku już po kilku minutach
- 4 przedziały wynikowe
- łatwe wykonanie
- pełny zestaw testowy

Procedura wykonania badania testem CRP

1. Pobierz próbkę krwi do załączonej kapilary
2. Odkręć korek probówki z buforem
3. Umieść kapilarę z próbką w probówce z buforem

4. Zakręć korek probówki
5. Wymieszaj tak, aby krew całkowicie wypłynęła z kapilary
6. Dodaj przygotowaną mieszaninę próbki do kasety testowej
7. Odczytaj wynik

Zawartość zestawu

- Kasety testowe
- Zakraplacze
- Kapilary
- Probówki testowe
- Instrukcja obsługi

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Do diagnostyki in vitro