



Actim[®] CRP

SZYBKIE BADANIE CRP – Z JEDNEJ KROPLI KRWI

W ciągu 5 minut **Actim CRP** pomaga ocenić prawdopodobieństwo infekcji bakteryjnej. Wynik otrzymuje się szybko i łatwo, bez użycia dodatkowych urządzeń. Potrzebna jest tylko jedna kropla krwi.

Nasz test pomaga podjąć decyzję czy pacjent wymaga antybiotyku lub dodatkowych badań. Mała próbka ma szczególne znaczenie przy badaniu dzieci, które często boją się pobrań krwi.

Szybki test Actim CRP jest doskonały w warunkach ambulatoryjnych, gdy wynik jest potrzebny natychmiast!

 Medix
Biochemica



www.medixbiochemica.com

Screenmed

ACTIM CRP

SZYBKI WYNIK – GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Test Actim CRP jest niezwykle łatwy w użyciu, zestaw testowy zawiera wszystkie niezbędne składniki do wykonania badania. Wyniki testu są dokładne i łatwe do interpretacji w ciągu zaledwie 5 minut. Test wymaga tylko 10 µl krwi pełnej z nakłucia palca. Krew z dodatkiem EDTA, heparyny lub cytrynianów też może być używana.

ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI

Testy Actim CRP mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej i są pakowane w pojedyncze opakowania zawierające wszystko do wykonania testu. Nie ma potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu do kalibrowania pomiarów.

JAK TO DZIAŁA

Test Actim CRP jest oparty o przeciwciała monoklonalne wysoko specyficzne dla CRP. Może być pomocny w różnicowaniu infekcji wirusowej i bakteryjnej.

Test obejmuje wszystkie istotne klinicznie poziomy CRP, z trzema różnymi poziomami detekcji: ~10-40 mg/l, 40-80 mg/l i >80 mg/l. Na podstawie wyników Actim CRP lekarz może uniknąć niepotrzebnej antybiotykoterapii w przypadku infekcji wirusowej.




CRP (białko C-reaktywne)

CRP jest białkiem ostrej fazy produkowanym bardzo szybko w reakcji na zapalenie, infekcję lub uszkodzenie tkanek.

Jeśli występuje infekcja - wzrost CRP jest wyższy w infekcjach bakteryjnych niż wirusowych.

CRP szybko spada gdy leczenie jest skuteczne.

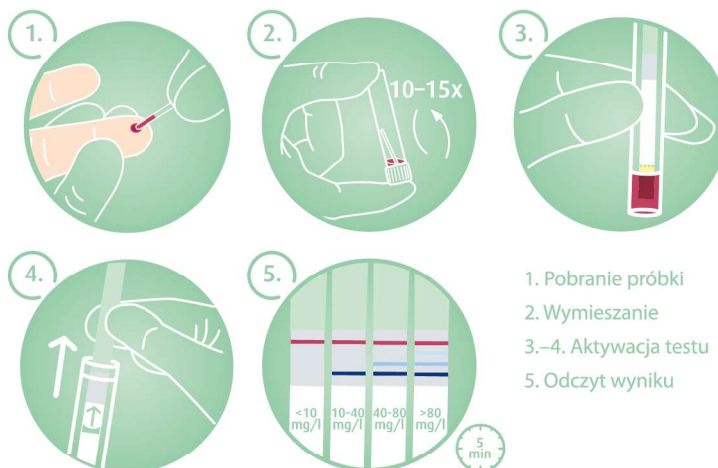

KONTAKT

Dystrybutor w Polsce:

Screenmed

ul. Okulickiego 5F
05-500 Piaseczno, Poland
tel. + 48 22 716 65 00
fax + 48 22 353 93 96
e-mail: office@screenmed.pl

www.screenmed.pl

Zamówienia

Actim CRP 20 testów / zestaw

31031ETAC

**Medix
Biochemica**

Medix Biochemica
Klovinpellontie 3, FI-02180 Espoo, Finland
medix@medixbiochemica.com

 www.medixbiochemica.com